



Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen[®]

Puregon *Pen*[®]
recombinant FSH follitropin beta

Så här använder du Puregon Pen[®]

Det är två huvudsakliga moment du behöver lära dig:

1. Ladda pennan med en ampull.
2. Injicera Puregon.



Så här förbereder du injektionen:

1. Skruva isär pennan.
2. Sätt in ampullen och skruva ihop pennan.
3. Skruva fast nålen och ta bort nålskydden.
4. Om ingen droppe blivit synlig, vrid doseringsknappen ett steg och tryck in injektionsknappen.





5. Ställ in din ordinerade dos genom att vrida doseringsknappen motsols.



6. Om du av misstag vrider doseringsknappen förbi den ordinerade dosen, ska du inte vrider tillbaka knappen. Fortsätt istället att vrider doseringsknappen IE motsols så långt det går.



7. Tryck därefter in injektionsknappen helt och vrid doseringsknappen till korrekt dos. På detta sätt undviker du läkemedelsförluster.



Så här injicerar du:

Puregon injiceras i buken under huden nedanför naveln.



1. Injicera inte på exakt samma ställe varje gång, utan sprid ut injektionerna något.
2. Lyft upp injektionsstället genom att klämma ihop huden mellan tummen och pek-fingret. Med den andra handen sticker du in hela nålen vinkelrätt mot huden. Tryck in injektionsknappen helt och vänta i fem sekunder.



3. Skruva därefter av nålen med hjälp av nålskyddet. Kasta sedan nålen enligt anvisning från din klinik. Om du har injicerat hela dosen, ska siffran noll visas i dosfönstret.

Byte av ampull

Om du före eller under injektionen märker att det inte finns tillräckligt med läkemedel i ampullen, har du två valmöjligheter:

1. Du kan slänga ampullen, sätta in en ny och därefter injicera.
2. Du kan göra slut på innehållet i ampullen och därefter ta resterande mängd från en ny ampull.

Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på hur du ska göra! Observera att det alltid finns lite mer läkemedel i ampullen än vad som anges på förpackningen. Det gör inget om du inte märker att det finns för lite läkemedel i ampullen förrän efter injektionen. Pennans dosfönster visar hur mycket läkemedel som saknas.

Säkerhetsföreskrifter

- Puregon Pen får bara användas för behandling av en person.
- Puregon Pen kan bara användas för Puregon ampuller.
- Förvara pennan med ampull i kylskåp (+2 – +8 °C) eller i rumstemperatur (högst +25 °C) i högst tre månader.

Om Schering-Plough

"To Earn Trust, Every Day" - Schering-Plough är ett forskningsintensivt globalt läkemedelsföretag. Genom egen biofarmaceutisk forskning och tillsammans med samarbetspartners utvecklar Schering-Plough behandlingar som bidrar till att rädda liv och förbättra människors livskvalitet runt om i världen. Schering-Ploughs vision är att varje dag sträva efter att förtjäna patienters, hälso- och sjukvårdens och allmänhetens förtroende.

Företagets forskning och utveckling är inriktad på receptbelagda och receptfria läkemedel. Schering-Plough är marknadsledande inom flera av sina terapiområden och de huvudsakliga verksamhetsområdena är: reumatiska sjukdomar, kvinnohälsa, tarmsjukdomar, CNS, astma/allergi, tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, anestesi, hjärta/kärl, hudsjukdomar och veterinärmedicin.

För mer information, besök www.schering-plough.se och www.schering-plough.com

fertilitetsguiden.nu

 **Schering-Plough**

PUREGON® (follitropin beta). Används framför allt vid behandling av kvinnlig infertilitet.

Farmakoterapeutisk grupp: Gonadotropiner, G03G A06.

Injektionsvätska, lösning i cylinderampuller att användas tillsammans med Puregon Pen®.

Förpackningar: 300 IE/0,36 ml, 600 IE/0,72 ml, 900 IE/1,08 ml. Ingår i förmånssystemet. Rx.

Datum för senaste översyn av produktresumé: Juni 2008. För ytterligare information och pris, se www.fass.se.

Schering-Plough AB, Box 6185, 102 33 Stockholm. Tel 08-522 21 500.

www.schering-plough.se, info@schering-plough.se